

Instructions simples Pathfinder 7N32098

Service commercial :

- **Téléphone** : 03 80 78 42 20
- **Télécopie** : 03 80 78 42 15
- **E-mail** : ht.aides.techniques@proteor.com
- **Adresse** : PROTEOR Handicap Technologie
Service Aides Techniques
6, rue de la Redoute Z.I. Saint-Apollinaire
B.P. 37833 - 21078 DIJON Cedex - France
www.proteor.com

Stocker ou modifier un mot en utilisant « STOCKER VOC BASE »

1. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
2. Choisir [STOCKER VOC BASE]†
3. Faire la séquence d'icône(s) du mot qu'on souhaite ajouter ou modifier.
4. Appuyer sur [OK] lorsqu'on a fait la séquence.
5. Appuyer sur [Ecrire le texte du message]
6. Taper le mot qui doit s'afficher lorsqu'on appuiera sur cette combinaison.
7. Penser à rajouter un espace après le mot (pour éviter qu'il ne colle tout ensemble)
8. Appuyer sur [OK]
9. En appuyant sur [Type de message] on peut activer la touche [Enregistrer le message] et ainsi l'utiliser pour mémoriser un message oral.
10. Appuyer sur [OK]

Effacer un mot en utilisant « EFFACER VOC. BASE »

1. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
2. Appuyer sur [EFFACER VOC. BASE]
3. Faire la séquence d'icône(s) du mot qu'on souhaite ajouter ou modifier.
4. Appuyer sur [OK] lorsqu'on a fait la séquence.
5. Choisir [OUI] si on est sûr de vouloir effacer.

Modifier la prononciation

1. Passer d'abord en mode « ABC » (entrée orthographique) pour taper le mot et tester la prononciation d'origine.



2. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
3. Choisir [Autres articles]
4. Appuyer sur [Dictionnaire vocal]
5. Choisir [Ajouter un mot]
6. Taper le mot correctement orthographié.
7. Choisir [OK]
8. Taper la prononciation (les espaces sont autorisés)
9. Choisir [OK]
10. Appuyer encore sur [OK]

Créer un répertoire (activité)



1. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
2. Choisir [Répertoire]
3. Taper le nom de la nouvelle page (13 caractères)
(pas besoin d'ajouter un espace à la fin)
4. Choisir [OK]
5. Choisir [Ecrire Icône Recherchée]
6. Taper la ou les premières lettres du symbole recherché. "V" pour Vert p.ex.
7. Choisir [Autres articles] ou [Articles précédents] pour naviguer dans les symboles disponibles.
8. Appuyer sur l'image souhaitée pour cette activité.
ATTENTION : le Pathfinder passe directement à la création ou modification des touches DANS l'activité ou répertoire dont on vient de choisir l'image. Un peu comme si dès qu'on avait choisi la couverture d'un livre celui-ci s'ouvrait pour nous faire voir l'intérieur.
9. Appuyer sur la touche qu'on souhaite paramétrer.
10. Choisir [Ecrire le texte du message]
11. Taper le mot ou la phrase *(avec un espace à la fin pour éviter qu'il ne colle tout ensemble)*
12. Appuyer sur [OK]

13. Choisir [Changer l'icône] et référez vous aux points 5 à 7 de cette procédure.
14. Choisir [Changer l'étiquette]
15. Taper le texte pour cette touche (*avec espace à la fin*)
16. Appuyer sur [OK]
17. Choisir la prochaine touche à définir et reprendre au point 9 de cette procédure.
18. Une fois terminé, appuyer 2x sur [OK] pour terminer cette procédure.

Modifier le contenu d'un répertoire (activité)



1. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
2. Choisir [Répertoire]
3. Choisir [Modifier un répertoire]
4. Choisir le répertoire qu'on souhaite modifier
(*aussitôt on se retrouve DANS le répertoire choisi*)
5. Choisir [modifier un élément du répertoire]
6. Se référer aux points 9 à 17 de la procédure « Créer une activité » ci-dessus pour la suite.

Supprimer un répertoire (activité)



1. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
2. Choisir [Autres articles]
3. Appuyer sur [Supprimer le répertoire]
4. Choisir l'activité que l'on souhaite supprimer.
5. Choisir [OUI] si on est sûr de vouloir effacer.
6. Appuyer sur [OK] pour terminer.

Répertoire dynamique



1. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
2. Choisir [Répertoire]
3. Choisir [Répertoires dynamiques]
4. Appuyer sur [Ajouter un répertoire dynamique]
5. Faire la séquence d'icône(s) du répertoire qu'on souhaite ajouter.
6. Appuyer sur [Ok]
7. Choisir le répertoire qu'on souhaite ouvrir par cette séquence d'icônes.
8. Appuyer 2x sur [Ok] pour terminer.

Cacher un répertoire



1. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
2. Choisir [Répertoire]
3. Choisir [Modifier un répertoire]
4. Choisir le répertoire que l'on souhaite cacher
5. Appuyer sur [Cacher/Montrer un répertoire] afin de sélectionner « Cacher »
6. Appuyer 2x sur [Ok] pour terminer.

Lier un répertoire

1. Commencer par créer tous les répertoires en suivant la procédure « Créer un répertoire » ci-dessus.




2. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
3. Choisir [Répertoire]
4. Choisir [Modifier un élément du répertoire]
5. Choisir le répertoire **à partir duquel on souhaite faire le lien.**
6. Choisir [Ecrire le texte du message]
7. Choisir [Insérer outil]
8. Choisir [Configurer répertoire].

ATTENTION : ne pas confondre avec la fonction [Choisir répertoire], cette dernière permettant de revenir au sommaire de tous les répertoires.

9. Choisir le répertoire **avec lequel on veut faire le lien.**
10. Appuyer sur [Ok]
11. Changer éventuellement l'icône et l'étiquette
12. Appuyer 2x sur [Ok] pour terminer.

Modifier l'image ou l'étiquette d'un répertoire

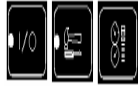

1. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
2. Choisir [Répertoire]
3. Choisir [Modifier Répertoire]
4. Choisir le répertoire dont on souhaite modifier l'image ou l'étiquette.
5. Utiliser les touches [Changer l'icône] ou [Changer l'étiquette]
6. Appuyer 2x sur [Ok] pour terminer.

Bloquer la boîte à outils



1. Appuyer 2x sur la touche [Réglages]
2. Choisir [Maint]
3. Appuyer sur [Verrou du système] pour sélectionner « Activé »
4. Appuyer sur [Ok]

Débloquer la boîte à outils



1. **MAINTENIR ENFONCE** la touche [Outils] durant plus de 5 sec.



2. Appuyer sur la touche (F2)
3. Appuyer sur [Verrou du système] pour sélectionner « Désactivé »
4. Appuyer sur [OK]