




SUPPORT DAESSY

Instructions de montage

7N1199

Service commercial :

- téléphone : 03 80 78 42 20
- télécopie : 03 80 78 42 15
- e-mail : ht.aides.techniques@proteor.com
- adresse : PROTEOR Handicap Technologie
Service Aides Techniques
6, rue de la Redoute Z.I. Saint-Apollinaire
B.P. 37833 - 21078 DIJON cédex - France
www.proteor.com

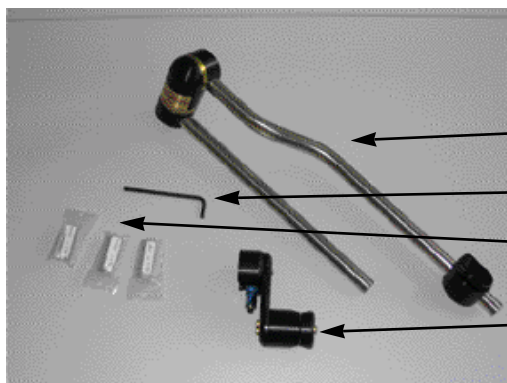


Contenu du colis :



- Bras avec articulation
- Clef six pans
- Entretoises
- Etau réglable




Dévissez les deux écrous de l'étau.

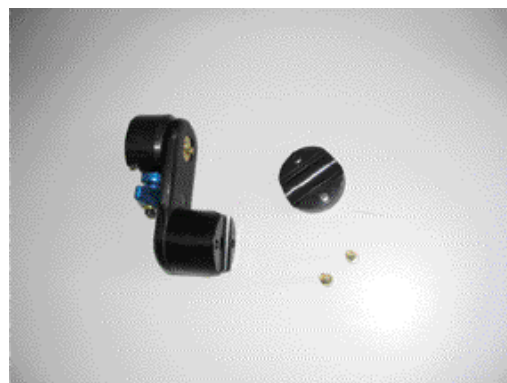


Séparez les deux pièces.

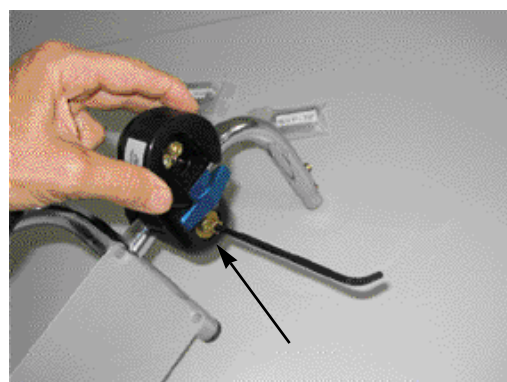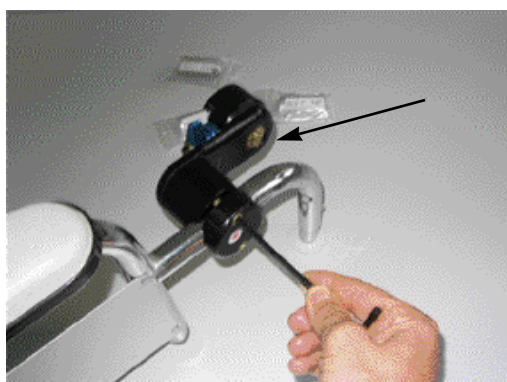

Choisissez le tube du fauteuil roulant qui convient. Placez les deux parties de l'étau de part et d'autre du tube du fauteuil (éventuellement en plaçant des entretoises fournies si nécessaire)
Revissez les deux écrous puis orientez le support en dévissant et revisant les écrous indiqués.

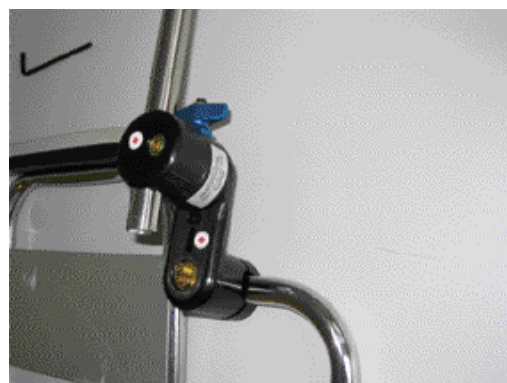


Présentez le bras articulé et emboîtez le dans l'étau.

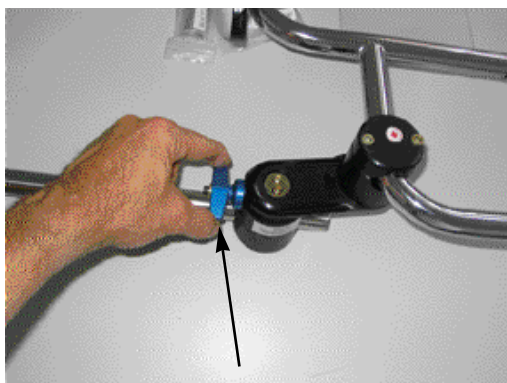


Serrez la vis quart de tour pour maintenir solidement le bras dans l'étau.




Les deux bras sont articulés...

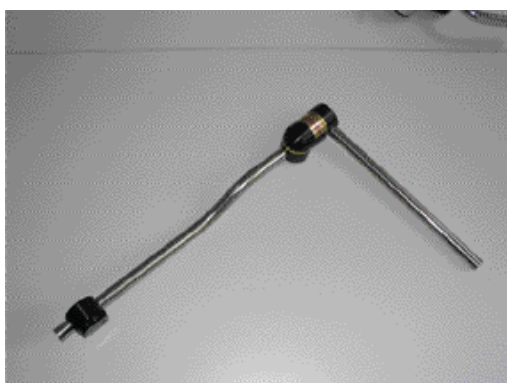

...et peuvent prendre différentes positions.

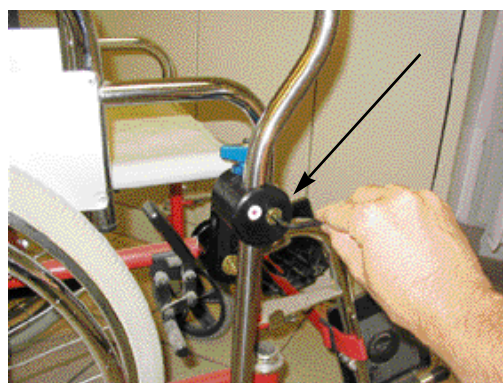

Cette vis permet de régler la hauteur de l'ensemble.

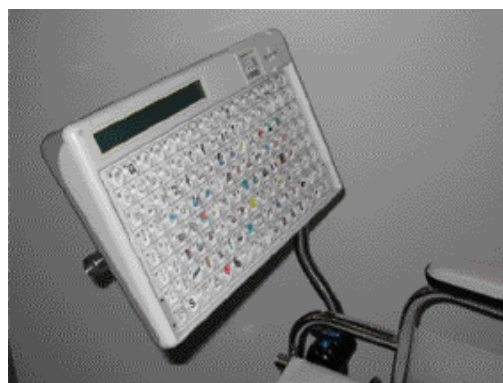

Exemple d'installation avec un appareil Deltatalker par l'intermédiaire des adaptations 7N125 et 7N126 (non fournies avec le support Daessy 7N11)



Position bras replié.