

GUIDE RAPIDE UTILISATION PICOPHONE AVEC TELECOMMANDE 7T25

Décrocher :
touche E

Raccrocher :
touche E

Appel :
touche E puis le numéro de téléphone que vous voulez faire

Faire les numéros en mémoire (1 à 9) :
Appui direct sur une touche de 1 à 9 (le téléphone va le faire automatiquement)

Faire les numéros en mémoire (de 10 à 50) :
Appui sur B puis le chiffre de la mémoire (entre 10 et 50)

Préparation du numéro avant de décrocher :
Appui sur C (la diode du téléphone clignote) puis le numéro de téléphone que vous voulez faire puis appui sur E.

Rappel du dernier numéro :
Appui sur A

Volume sonore :
Appui sur F quand vous êtes en train de parler .

Décrocher automatique :
Appui sur F quand le téléphone est en veille ou appui sur la touche « décroché automatique » du téléphone (celle du téléphone avec la main)

- le voyant jaune s'allume.
- Picophone décroche seul après 5 sonneries.
- Picophone raccroche après 30 secondes de conversation (réglable voir manuel téléphone)
- Il est possible de raccrocher avec E

Mise en mémoire des numéros de 1 à 50 :
Appui sur la séquence 0 – F - 0
Appui sur les deux chiffres de l'emplacement (01 – 50)
Appui sur les chiffres du numéro
Appui sur D
Appui sur E pour terminer.