


Guide de démarrage rapide :
Appareil de communication progressif
SuperTalker™

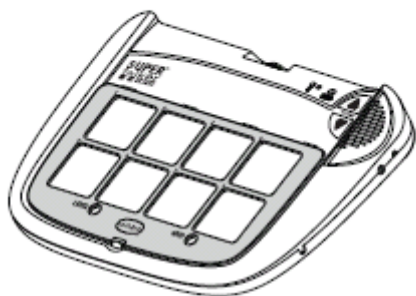


Calques et idées disponibles sur www.ablenetinc.com

1 Alimentation du SuperTalker



Insérez quatre piles AA dans l'appareil comme illustré. Le bouton de marche/arrêt se situe sur le côté de l'appareil.

2 Sélection d'un niveau et d'une grille

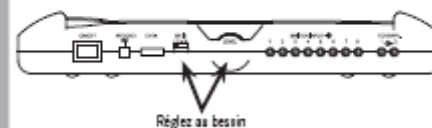


Avec le calque et le protège-clavier en place : Sélectionnez un niveau [LEVEL (1-8)] et une grille [GRID (1, 2, 4, 8)] via les commandes situées sur le côté de l'appareil.

REMARQUE : Veillez à faire correspondre le numéro de grille au protège-clavier et au calque actuellement installés sur l'appareil.


Les informations sur les calques et les protège-claviers, ainsi que des conseils utiles se trouvent au verso.

3 Activation du mode d'enregistrement

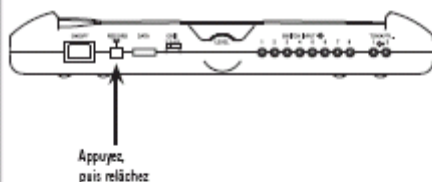

Appuyez sans relâcher sur le bouton RECORD jusqu'à ce que le voyant RECORD s'allume, puis relâchez le bouton.

4 Enregistrement de messages

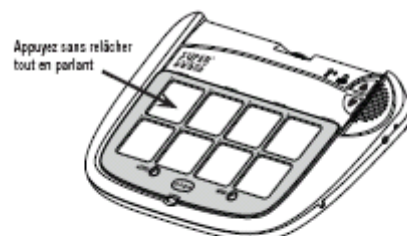


Appuyez sans relâcher à l'emplacement du message souhaité et commencez à parler dès que vous entendez un bip. Relâchez une fois l'enregistrement terminé.

Reprenez pour des messages supplémentaires.

Le voyant RECORD clignote en cours d'enregistrement.

REMARQUE : Parlez près du microphone pour un son clair et fort.

5 Désactivation du mode d'enregistrement

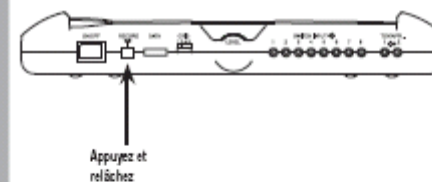

Appuyez brièvement sur le bouton RECORD pour quitter le mode d'enregistrement.

REMARQUE : Cet appareil propose un temps total d'enregistrement de 16 minutes. Le voyant RECORD passe au jaune quand il ne reste plus que deux minutes.

