

# NOTICE

## INTERFACE MI-5

### 7H02

#### DESCRIPTION GENERALE

L'interface USB Mouse Interface-5 (MI-5) permet le contrôle d'une souris PC OU MAC par un port USB.

5 contacteurs branchés sur les prises jack 3,5 permettent l'accès à :

- Déplacement vers le haut du curseur
- vers le bas
- vers la gauche
- vers la droite
- le click gauche
- le double click gauche
- le click maintenu.



Nota : les contacteurs sont fournis séparément

#### CARACTERISTIQUES SYSTEMES

- PC ou MAC avec port USB
- Un 2<sup>ème</sup> port USB si le PC est déjà équipé d'une souris USB.
- Options d'accessibilité Windows.
- Apple : Universal access
- Linux : Access X

#### INSTALLATION

- Brancher l'interface sur un port USB de votre ordinateur
- Brancher les 5 contacteurs sur l'interface
- Vous pouvez continuer d'utiliser votre souris.
- Redémarrer votre ordinateur
- Les contacteurs contrôlent maintenant votre souris.

#### UTILISATION

La souris standard permet les mouvements du curseur à l'écran de votre ordinateur et a des touches pour faire des sélections (click gauche notamment)

L'interface MI-5 utilise 4 contacteurs pour les mouvements verticaux et horizontaux. L'appui simultané sur un contacteur « mouvement » vertical et un contacteur « mouvement » horizontal va donner la diagonale correspondante.

Le 5<sup>ème</sup> contacteur permet le click gauche, le double click (en appuyant 2 fois) et le click maintenu en restant appuyé.