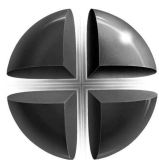
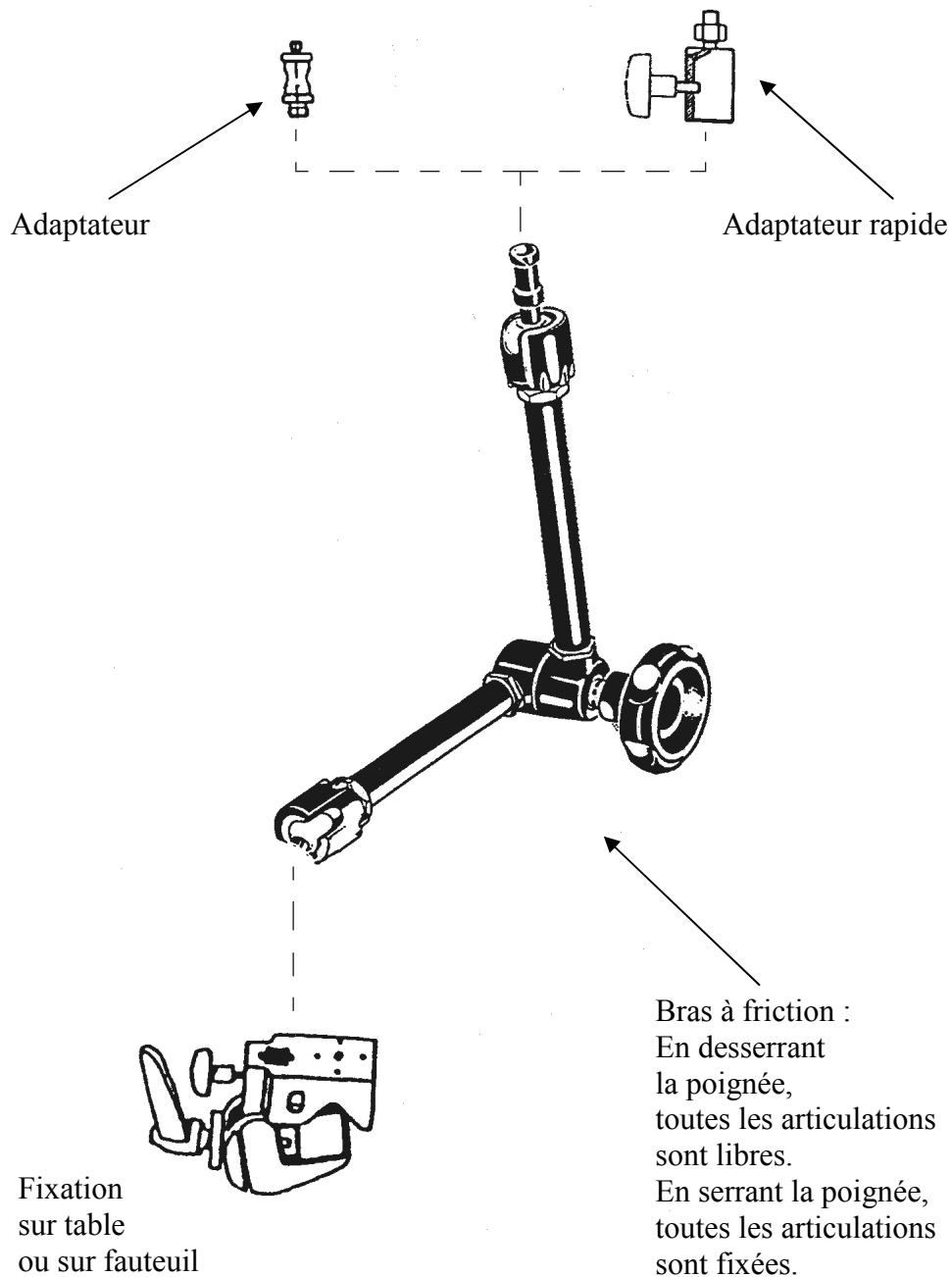


## MODE D'EMPLOI

## SUPPORT ORIENTABLE NEMO 7T21

INSTALLATION DU SUPPORT ORIENTABLE 7T21  
SUR TABLE OU SUR FAUTEUIL ROULANT

HANDICAP TECHNOLOGIE

PROTEOR

6, rue DE LA REDOUTE - Z.I. SAINT-APOLLINAIRE  
B.P. 37833 - 21078 DIJON CEDEX - FRANCE  
PHONE : +33 3 80 78 42 10 - FAX : +33 3 80 78 42 15  
ht.orthopedie@proteor.com - www.proteor.com

## AVERTISSEMENT

Lors de l'installation d'un appareil (Dialo, Nemo) sur le support 7T21, il convient de suivre les étapes suivantes.

*To install the device on the support 7T21, follow the next steps.*



1/ Le support 7T21 / Support  
2/ L'adaptateur rapide / Adaptor  
3/ La clé fournie / Key supplied



L'adaptateur rapide vient se visser sous l'appareil (Dialo, Nemo). 3 ou 4 tours suffisent.

**NE PAS VISSER LA TIGE JUSQU'AU FOND.**

*The adaptor is fixed under the device. 3 or 4 turns. Don't TURN THE SCREW TO THE BOTTOM.*



A l'aide de la clé, serrer le contre-écrou sous l'appareil.

*With the key, tighten the lock nut under the device to fix it.*



Après avoir fixé l'adaptateur rapide sous l'appareil, fixer le tout sur le bras en tournant la molette au maximum contre la partie plate du cylindre.

*Then put the device on the support and fix it by tightening the screw on the plate part of the arm.*