

Zono

Pour quels types de handicap ?



QuhaZono

QuhaSento



Zono est une souris sans fil gyroscopique destinée aux utilisateurs ne pouvant pas se servir de la souris classique d'un ordinateur. Elle se fixe à la tête, sur une branche des lunettes, au poignet, au pied ou toute autre partie mobile du corps.

Les faibles mouvements de tête permettent de contrôler le curseur de la souris dans l'ensemble des directions. Une amplitude d'une dizaine de degré à gauche/droite, Bas et Haut peut suffire pour parcourir tout l'écran.

Systeme prêt à l'emploi !

Zono ne nécessite pas l'installation d'une pastille sur le front, et sans fil, l'installation est facilitée et durable.

Zono couplé à **Sento** (contacteur au souffle sans fil) permet d'avoir accès aux clics sans passer par un logiciel de validation automatique

Zono est un système autonome pouvant fonctionner 30 heures, et se recharge en quelques heures sur un port USB

Zono est compatible avec les systèmes Windows, Mac OS, Linux et Android (OTG compatible)

Zono est particulièrement destiné aux :

- Blessés médullaires hauts (L.I.S, Tétraplégiques,...) souhaitant utiliser l'outil informatique
- Personnes atteintes de pathologies neurologiques évolutives (SLA, SEP, Parkinson,...)
- Autres personnes à faible mobilité souhaitant accéder à son univers numérique.


Zono : Caractéristiques fonctionnelles

Accessibilité

- Zono est facilement réglable. Les sensibilités « horizontale » et « verticale » peuvent s'ajuster en fonction de l'amplitude disponible des mouvements de tête de l'utilisateur.
- Validation par Contacteur (s) à brancher sur le récepteur USB pour faire un seul clic ou alors deux contacteurs pour clic gauche et clic droit (contacteur en option)
- Validation par clic Automatique réglable (à partir du logiciel Zono téléchargeable gratuitement)
- Validation en utilisant le logiciel de clic automatique « dwell clicker 2 » sur un PC (Windows)
- Validation par Sento, contacteur au souffle sans fil intégré au casque Zono (option)

Installations

- **PC/Mac/Linux et Tablette Windows :**
 - en branchant directement le récepteur sur le port USB
- **Tablette et smartphone Android :**
 - En utilisant un câble USB OTG et en vérifiant la comptabilité « OTG » du terminal.
 - Possibilité de régler la sensibilité et la vitesse du clic automatique de Zono sur le PC, et les réglages seront appliqués à ZONO
- **Mini PC Android :**
 - Ces mini boîtiers, permettent à moindre coût d'avoir un environnement Tablette Android et donc de pouvoir aller sur Internet, envoyer des emails, Skype, Facebook, faire des jeux et applications sur sa TV (câble HDMI entre le boîtier et l'écran). Connecté à internet par wifi, le port USB du mini PC Android peut recevoir le récepteur de Zono. Depuis son lit ou le fauteuil, l'utilisateur peut bénéficier d'un accès au « numérique » sur grand écran, et accessible malgré le handicap. Nul n'est alors nécessaire de chercher à installer une tablette au lit ou un écran de PC.

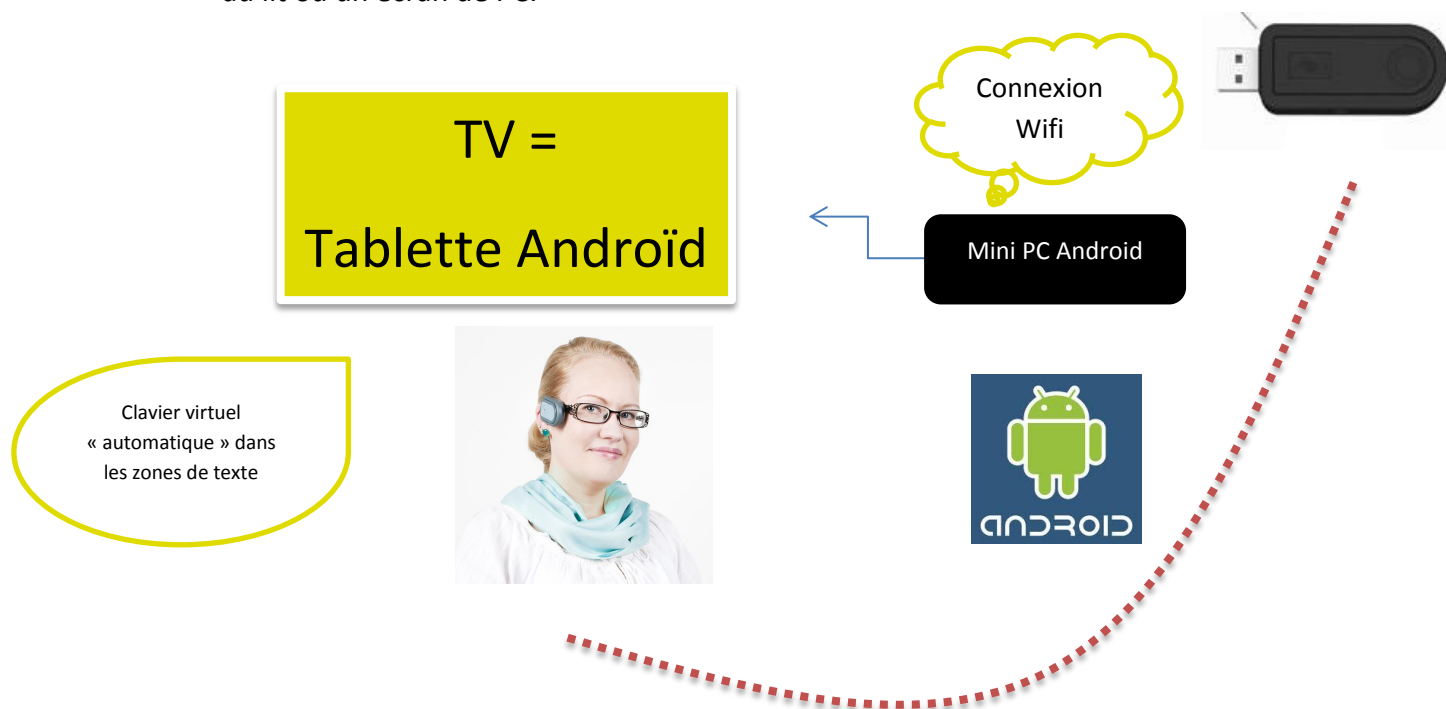

Zono : Données Techniques

Spécifications techniques

- Dimensions : longueur = 59mm, largeur = 33mm, hauteur = 15mm, poids = 23gr
- Connexion radio 2.45Ghz sans fil jusqu'à 10m de distance
- Batterie Li-Po (Lithium-polymère) 240 mAh, **autonomie de 30h en utilisation** et jusqu'à 20 jours en pause automatique
- Récepteur USB 2.0 HID, muni d'un connecteur jack stéréo 3.5mm pour connecter un contacteur ou deux avec l'adaptateur inclus



Contenu

- la souris sans fil gyroskopique ZONO
- le récepteur USB
- l'adaptateur jack pour contacteur
- l'adaptateur pour 2 contacteurs
- un bandeau velcro
- câble USB pour la recharge
- un "clip" universel pour accueillir ZONO et permettre la fixation de la souris
- manuel utilisateur et CD rom
- Le contacteur au souffle sans fil Sento (option)



Références

Référence	Désignation
7H75	Zono
7H7501	Casque support Zono noir
7H7502	Adaptateur micro USB OTG Android
7H7503	Sento
Contacteur	Voir fiche contacteur
7E22	Dwell Clicker 2 – logiciel de clic automatique
Logiciel de communication	Voir fiche Grid 3 – Tobii Communicator 5
Appareil de communication compatible	Voir fiche Accent – Tobii Iserie – Grid Pad
Contrôle d'environnement compatible	Voir fiche Telo

Accompagnement

Par la société Proteor avec son réseau de prestataires qualifiés :

- *Expert depuis plus de 32 ans*
- *Installation/mise en service possible*
- *Devis gratuit*
- *Possibilité d'explication et d'assistance par téléphone (gratuit)*
- *Appareil de prêt en cas de besoin (gratuit sous garantie pendant le traitement de la panne)*

Zono est disponible en location longue durée (mensualité)

(Valable en France métropolitaine)

Contacts et renseignements

Proteor aides électroniques

- Par email : aides.electroniques@proteor.com
- Par téléphone : 03.80.78.42.20
- Site internet : aides.electroniques.proteor.fr

Assistance technique / support client

- Par téléphone : 03.80.78.42.49
- Par email : support@proteor.com