

# Accent 800 – 1000 - 1400

## Pour quels types de handicap ?

---



**Accent** est une aide à la communication dédiée au handicap, plus particulièrement aux personnes dépourvues de la parole avec troubles du langage associés, cherchant un appareil pour communiquer, parler, s'exprimer, échanger avec leur entourage et l'extérieur.

**Accent** permet l'affichage de grilles de 4, 8, 15, 45, 60, 84, 144 cases personnalisables, et permettant une organisation sur une page, en arborescence (thèmes), ou en utilisant la méthode combinatoire MINSPEAK (une méthode reconnue pour sa richesse de vocabulaire et sa spontanéité en conversation). Des grilles pré établies (word stratégie 84 cases, MiFaSoLa 45 cases) sont déjà intégrées.

**Accent** possède des voix de synthèse intégrées (en plus de pouvoir enregistrer sa voix), les messages peuvent donc être générés à partir d'images, de photos ou de lettres, et diffusés en voix de synthèse Homme ou Femme (réglable).

**La gamme Accent** a été conçue pour un usage portable, sur une table, au lit ou au fauteuil roulant. Les dispositifs disposent d'une poignée intégrée pour un maximum de portabilité.

**Accent** est accessible par écran tactile réglable avec intégration possible de guides doigts (option), par un défilement visuel et/ou auditif à un ou deux contacteurs adaptés à l'utilisateur, et même via un joystick fauteuil roulant (selon compatibilités) ou une souris/joystick USB. Un accès par commande oculaire est possible sur les modèles 1000 et 1400

**Accent** devient un appareil très polyvalent au regard des programmes de communication très simples ou élaborés qu'il est possible de générer, et aussi grâce aux différents moyens d'accès possibles. Ainsi il peut convenir à un usage collectif d'apprentissage avec une sauvegarde des données de chaque utilisateur.

**Accent** est un équipement autonome, qui répond aux exigences de la communication alternative : Puissance sonore, Autonomie, Robustesse, et accessibilité.

**Il est aussi possible d'acquérir une version Garantie 3 ans, pannes et casses accidentelles incluses\***

**Accent** est donc particulièrement destiné aux personnes :

- IMC
- Aphasiques
- Autistes

\*si achat effectué avec Garantie 3 ans. Prise en charge totale des casses accidentelles (hors frais de port aller) (écran, connecteurs, ...) à raison de 2 fois sur la période de 3 ans et une fois par an maximum

# Accent : Caractéristiques fonctionnelles

## Accessibilité

- Sélection directe sur l'écran tactile capacitif (réglage des temps d'appuis et temps entre deux appuis possible pour ne pas prendre en compte les tremblements par exemple),
- Possibilité d'intégrer un guide doigts (en option).
- Défilement par un ou deux contacteurs (contacteur en option -possibilité d'utiliser des contacteurs à technologie sans fil Bluetooth)
- Défilement avec retour auditif possible (contacteur en option)
- Joystick fauteuil roulant (selon compatibilités)
- Connectivité USB pour utiliser un pointeur de tête, une souris, ou un système émulateur de souris
- Compatible commande oculaire Nu Eye (sur accent 1000/1400), pour naviguer par le regard, avec sélection automatique /clignement /contacteur.
- Compatible commande oculaire MGA2 (sur accent 1000/1400), pour naviguer par le regard, avec sélection automatique /clignement /contacteur pour logiciel Grid 3 (option)

## Actions

- Aides à la communication par images ou photos, transcrit en voix enregistrée ou voix de synthèse
- Aides à la communication textuelle, transcrit en voix de synthèse Homme ou Femmes (réglable)
- Média Player intégré pour lire les fichiers MP3, WMA, et WAV en stéréo
- Possibilité de créer des scènes visuelles (photos étendues), avec des fonctions (voix, lien vers une page) « cachées » derrière l'image. Par exemple prendre une photo de famille, et lorsqu'on appuie sur « la maman », l'appareil dit « Ma maman s'appelle.... ».
- Possibilité d'accéder à l'environnement Windows, d'accéder à internet et email.
- Connexion Bluetooth pour accès téléphonie, SMS, contacteurs, haut-parleur externe,...
- Contrôle d'environnement Infrarouge pour piloter une TV, une lumière, la domotique...

## Design et ergonomie

- Portable (particulièrement pour accent 800)
- Grande puissance sonore
- Adaptation possible sur supports pour fauteuils roulant et lit.
- Autonome et résistant au choc
- Prêt à communiquer
- Ecran capacitif
- Port USB pour accès souris, sauvegarde et transfert simples et rapides de vos données.

## Personnalisation

- Formats de grilles : 4, 8, 15, 45, 60, 84, 144 touches ou Format libre
- 6 zones pour enregistrer 6 profils d'utilisateurs dans un même appareil
- possibilité de créer des scènes visuelles pour l'apprentissage du langage
- Accéder à plus de 4500 symboles Minspeak pour personnaliser votre vocabulaire et 10000 symboles Clarity
- Accéder à plus de 8500 symboles PCS (option)
- Possibilité d'importer des symboles et des images personnelles pour personnaliser l'appareil et créer des scènes visuelles
- Facilité de création d'activités et de pages pour du vocabulaire spécialisé avec le constructeur de lexique.

## Efficacité pédagogique

- Logiciel Nu Voice inclus (téléchargeable gratuitement sur site Proteor) : permet d'émuler le logiciel présent dans Accent sur votre ordinateur afin de pouvoir programmer sans l'appareil
- Grilles Minspeak intégrées : MiFaSoLa 45 cases – WordStrategy 84 cases.

# ACCENT : Données techniques

	Accent 800	Accent 1000	Accent 1400
<b>Taille (cm)</b>	24,9 – 15 - 3,5	30,4 – 19 – 3,8	35,8 – 22,6 – 4.6
<b>Poids</b>	0,88Kg	1,34 Kg	2,68 Kg
<b>Autonomie</b>	11h à 13h (selon utilisation)	13h à 15h (selon utilisation)	18h à 20h (selon utilisation) (10-12h avec NuEye)
<b>Ecran</b>	Capacitif 8.1 pouces	Capacitif 10,1 pouces	Capacitif 14 pouces
<b>Connectiques</b>	2 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0)	2 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0)	3 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0) – Lecteur Carte SD – 1 port HDMI

- ✓ Support d'inclinaison pour table inclus
- ✓ Voix de synthèse : Acapela Homme et Femme réglables.
- ✓ Caméra Arrière et frontale
- ✓ Système d'exploitation Windows 8, accès possible. (par écran tactile et souris)
- ✓ Wifi
- ✓ Bluetooth pour pilotage PC, connexion contacteur sans fil, haut-parleur externe, téléphone (SMS et appel selon compatibilités)

## Références

Désignation	Accent 800	Accent 1000	Accent 1400
<b>Accent (garantie 1 an)</b>	7F06B	7F03B	7F14
<b>Accent Garantie 3 ans (casses inclus*)</b>	7F06B-EXT3	7F03B-EXT3	7F14-EXT3
Commande oculaire Nu Eye	-		7F0201
Commande oculaire MGA2 (pour Grid 3)			7VI02
Station d'accueil MGA2 pour 7F03B ou 7F14			7F0202
Commande à mvt de tête pour Accent génération B		7F20	
Guide doigts pour Grid 3 (selon modèle de grilles à préciser)	ZZDIVA	ZZDIVA	ZZDIVA
Guide doigts mince 4 cases	ZZDIVA	-	-
Guide doigts mince 8 cases	ZZDIVA	-	-
Guide doigts mince 15 cases	ZZDIVA	-	-
Guide doigts mince 45 cases	ZZDIVA	ZZDIVA	-
Guide doigts mince 60 cases	ZZDIVA	ZZDIVA	-
Guide doigts mince 84 cases	ZZDIVA	ZZDIVA	-
Guide doigts 144 cases	-	-	7F140144
Guide doigts 84 cases	7F0608B	7F0315B	7F14084
Guide doigts 60 cases	ZZDIVA	ZZDIVA	ZZDIVA
Guide doigts 45 cases	7F0610B	7F0313B	7F14045
Sacoche accent	7F0611	7F0304	Sac à dos 7F0110
Protection accent	7F0607	7F0312	Protection écran 7F0109
Bandoulière		7F0302	7F0111
Boucles pour bandoulière		7F0303	
Pack alimentation externe			7F0307
Chargeur Allume Cigare pour Accent			7F0308
Symbole PCS (8500)			ZZDIVA
Adaptateur Bluetooth USB pour pc et mac			7N7804
Contacteur Bluetooth			7N7805
Support roulettes RHD Télescopique (TS)/(LA)			7R02
Support roulettes RHD Pliable/(TS)/(LA)			7R03
Support roulettes RHD pliable (TS)/(LA) - Flottant			7R04
Adaptateur Rehadapt / Accent			7R20
<b>Support fauteuil roulant</b>			<b>ZZDIVA(VMS#)</b>
Support de table Float RHD avec adapt UDS 2/6kg			7R14
Support 3 segments RHD avec adaptateur UDS 1,5Kg			7R15
<b>Formation Accent et Minspeak sur 2 jours, pour 2 personnes à Paris. Maniement de l'appareil et initiation au concept Minspeak</b>			<b>ZZFORMAT</b>

\*si achat effectué avec Garantie 3 ans. Prise en charge totale des casses accidentelles (hors frais de port aller) (écran, connecteurs, ...) à raison de 2 fois sur la période de 3 ans et une fois par an maximum

# Accompagnement

---

Par la société Proteor et son réseau de prestataires qualifiés :

- *Expert depuis plus de 32 ans*
- *Formation spécifique sur deux jours pour deux personnes possible (une journée sur le concept de communication Minspeak et l'enseignement de la communication alternative améliorée et une journée d'apprentissage à la programmation et utilisation de l'appareil)*
- *Installation/mise en service possible*
- *Présentation sur place*
- *Devis gratuit*
- *Maintenance spécifique*
- *Possibilité d'explication et d'assistance par téléphone (gratuit)*
- *Appareil de prêt en cas de besoin (gratuit sous garantie pendant le traitement de la panne)*

## Contacts et renseignements

---

### **Proteor aides électroniques**

- Par email : [aides.electroniques@proteor.com](mailto:aides.electroniques@proteor.com)
- Par téléphone : 03.80.78.42.20
- Site internet : [aides.electroniques.proteor.fr](http://aides.electroniques.proteor.fr)

### **Assistance technique / support client**

- Par téléphone : 03.80.78.42.49
- Par email : [support@proteor.com](mailto:support@proteor.com)