

Accent Open 800 – 1000 - 1400

Pour quels types de handicap ?



Accent Open est une aide à la communication dédiée au handicap, plus particulièrement aux personnes dépourvues de la parole avec troubles du langage associés, cherchant un appareil pour communiquer, parler, s'exprimer, échanger avec leur entourage et leur environnement extérieur.

Accent Open permet d'accueillir différents logiciels de Communication alternative : Grid 3, Communicator, Mind Express... dont l'affichage de grilles est personnalisable et permettant une organisation sur une page, en arborescence (thèmes). Ainsi des voix de synthèse intégrées (en plus de pouvoir enregistrer sa voix), énoncent les messages à partir d'images, de photos ou de lettres.

Accent Open a été conçu pour un usage portable, sur une table, au lit ou au fauteuil roulant. Les dispositifs disposent d'une poignée intégrée pour un maximum de portabilité.

Accent Open est accessible par écran tactile réglable avec intégration possible de guides doigts (option), par un défilement visuel et/ou auditif à un ou deux contacteurs adaptés à l'utilisateur, et même via un joystick fauteuil roulant (selon compatibilités) ou une souris/joystick USB. Un accès par commande oculaire est possible sur les modèles 1000 et 1400

Accent Open devient un appareil très polyvalent au regard des programmes de communication très simples ou élaborés qu'il est possible de générer, et aussi grâce aux différents moyens d'accès possibles. Ainsi il peut convenir à un usage collectif d'apprentissage avec une sauvegarde des données de chaque utilisateur.

Accent Open est un équipement autonome, qui répond aux exigences de la communication alternative : puissance sonore, robustesse, et accessibilité.

Accent Open est donc particulièrement destiné aux personnes :

- IMC
- Aphasiques
- TSA (autismes)

Accent Open : Caractéristiques fonctionnelles


Accessibilité

- Sélection directe sur l'écran tactile capacitif (réglage des temps d'appuis et temps entre deux appuis possible pour ne pas prendre en compte les tremblements par exemple),
- Guide-doigts disponible (en option).
- Défilement par un ou deux contacteurs (contacteur en option -possibilité d'utiliser des contacteurs à technologie sans fil Bluetooth)
- Défilement avec retour auditif (contacteur en option)
- Joystick fauteuil roulant (selon compatibilités)
- Connectivité USB pour utiliser un pointeur de tête, une souris, ou un système émulateur de souris
- Commande oculaire (Accent Open 1000/1400), pour naviguer par le regard, avec sélection automatique /clignement /contacteur.

Actions


- Selon logiciel :
 - Aide à la communication par images ou photos, transcrite en voix enregistrée ou voix de synthèse
 - Aide à la communication textuelle, transcrite en voix de synthèse Homme ou Femme
 - Média player intégré pour lire les fichiers MP3, WMA, et WAV en stéréo
 - Possibilité de créer des scènes visuelles (photos étendues), avec des fonctions (voix, lien vers une page) « cachées » derrière l'image. Par exemple prendre une photo de famille, et lorsqu'on appuie sur « la maman », l'appareil dit « Ma maman s'appelle.... ».
 - Environnement Windows, internet et email.
 - Connexion Bluetooth pour accès téléphonie, SMS, contacteurs, haut-parleur externe,...
 - Contrôle d'environnement Infrarouge pour piloter une TV, une lumière, la domotique... et par Radio (BJ) – module en option

Exemple avec logiciel Grid 3

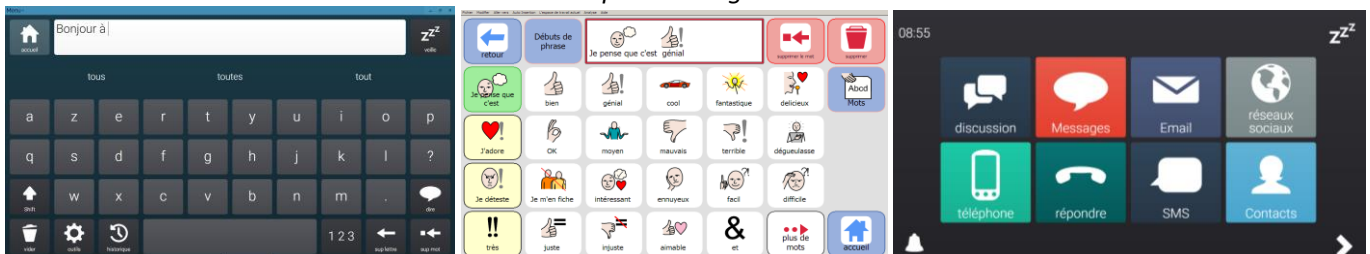

Design et ergonomie

- Portable (particulièrement pour Accent Open 800)
- Grande puissance sonore
- Adaptation possible sur supports pour fauteuils roulants et lits.
- Autonome et résistant au choc
- Prêt à communiquer
- Ecran capacitif
- Port USB pour accès souris, sauvegarde et transfert simples et rapides de vos données.

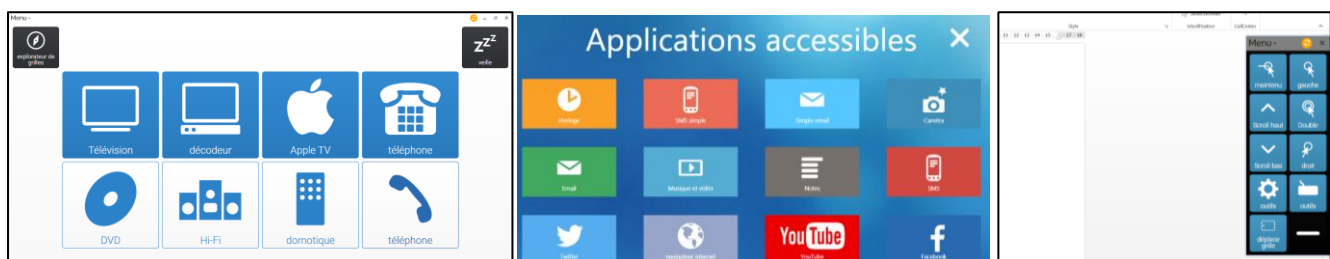

ACCENT OPEN : Données techniques

	Accent Open 800	Accent Open 1000	Accent Open 1400
Taille (cm)	24,9 – 15 - 3,5	30,4 – 19 – 3,8	35,8 – 22,6 – 4.6
Poids	0,88Kg	1,34 Kg	2,68 Kg
Autonomie	11h à 13h (selon utilisation)	13h à 15h (selon utilisation)	18h à 20h (selon utilisation)
Ecran	Capacitif 8.1 pouces	Capacitif 10,1 pouces	Capacitif 14 pouces
Connectiques	2 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0)	2 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0)	3 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0) – Lecteur Carte SD – 1 port HDMI

- ✓ Support d'inclinaison pour table inclus
- ✓ Caméra Arrière et frontale
- ✓ Système d'exploitation Windows 10, accès possible
- ✓ Wifi
- ✓ Bluetooth pour pilotage PC, connexion contacteur sans fil, haut-parleur externe, téléphone (SMS et appel selon compatibilités)

Références

Désignation	Accent Open 800	Accent Open 1000	Accent Open 1400
Accent Open (Garantie 1 an)	7F06BOPEN	7F03BOPEN	7F14BOPEN
Accent Open (Garantie 3 ans – casses incluses*)	7F06BOPEN-EXT3	7F03BOPEN-EXT3	7F14BOPEN-EXT3
Module contrôle d'environnement IR et Radio BJ	7FECUOPEN		
Commande oculaire	-	7TD50T + ZZDIVA (station accueil)	
Commande à mouvement de tête	7F20		
Guide-doigts	ZZDIVA (en fonction du modèle de grille souhaitée)		
Sacoche Accent Open	7F0611	7F0304	Sac à dos 7F0110
Protection Accent Open	7F0607	7F0312	7F0109
Bandoulière	7F0302		7F0111
Support de montage	Voir fiche support		
Adaptateur pour support RHD	7R20		
Logiciel Grid 3	7 E30 (1+1 activation)		
706201ATPCO2	Assistance Technique Proteor Premium 2 ans		
706201ATPCO3	Assistance Technique Proteor Premium 3 ans		
706201ATPCO5	Assistance Technique Proteor Premium 5 ans		
ZZMISES3	Mise en service et initiation sur site avec logiciel de communication		

Module contrôle d'environnement IR et Radio BJ



Bandoulière



Protection Accent Open



Commande à mouvement de tête



Adaptateur pour support RHD



*voir conditions de garantie

Accompagnement

Par la société Proteor ou son réseau de prestataires qualifiés :

- Expert depuis plus de 30 ans
- Installation/mise en service
- Assistance Technique Proteor Premium
- Formation spécifique

Assistance Proteor Premium

Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national et international pour le développement des technologies au service de l'indépendance et de l'autonomie des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maîtriser, de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela Proteor a conçu un service d'assistance Premium pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l'utilisation quotidienne de ces technologies. Découvrez les services proposés par l'Assistance Proteor Premium sur notre site internet.

Contacts et renseignements

Proteor aides électroniques

- @mail : aides.electroniques@proteor.com
- Tél : 03 80 78 42 20

Assistance technique Proteor Premium

Présentez votre numéro client à l'appel ou dans votre mail

- @mail : support@proteor.com
- Tél : 03 80 78 42 49

Et retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur notre site : www.aides.electroniques.proteor.fr