

Télo

Pour quels types de handicap ?



Télo est une télécommande autonome spécifiquement conçue pour des personnes dépendantes. Il concerne principalement mais pas uniquement les personnes atteintes de:

- Tétraplégie traumatique
- Sclérose latérale amyotrophique
- Sclérose en plaque
- myopathie
- **Toute limitation motrice ou toute difficulté ne permettant pas l'usage des télécommandes traditionnelles du domicile.**

Télo a été conçu pour un usage sur table, lit ou fauteuil roulant avec une compatibilité sur différents supports.

Télo se décline en deux versions indépendantes. Une standard fonctionnant avec des codes Infra rouges (IR) et une Radio (qui fonctionnent à la fois en IR et en Radio fréquence) qui permet en plus le contrôle de récepteur Radio dans l'environnement domestique. La fonction Téléphone portable est incluse dans Telo. Il suffit alors d'y insérer sa carte SIM.

Pourquoi Telo ?

Accessibilité

- par écran tactile couleur de 4,9 pouces (6,5cm par 10,7cm) paramétrable (jusqu'à 10 lignes/10 colonnes, pictogramme,...)
- Possibilité de guides doigts 9 ou 20 cases
- par 1 ou 2 contacteurs avec ou sans fil adaptés aux capacités motrices (contacteur en option)
- avec défilement visuel et/ou auditif des fonctions
- Accès par joystick/souris USB adapté aux besoins (joystick en option)
- Accès par joystick de fauteuil roulant électrique (selon compatibilités)
- Possibilité de clic automatique réglable par accès au joystick
- Par commande vocale (option)
- Reconnaissance des lieux avec affichage des fonctions disponibles (page Salon, Page chambre, page cuisine,...) (option)




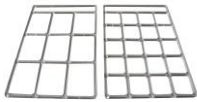
Actions

- Envoi de codes infrarouges par 6 puissants émetteurs multidirectionnels pour piloter les équipements :
 - audio vidéo et le téléphone (Infra rouge)
 - domotique (volets, portes, lumière,...)
- Appel et SMS via l'intégration de la carte SIM dans Telo (pas besoin de téléphone)
- Envoi de codes Radio BJ pour piloter tous les équipements domotiques BJ
- Envoi de code Easywave par l'intermédiaire du convertisseur Easy-IR
- Pilotage d'un ordinateur (récepteur infra rouge pour pc en option)
- Communication pictographique avec vos propres photos et vos banques d'images (à programmer depuis Telo PC)

Caractéristiques

- Polyvalent, simple à programmer (et à reprogrammer)
- Telo est discret (16/9,5/3cm et 420g)
- Telo est installable facilement table ou sur fauteuil roulant grâce à son support orientable (en option), et permet un passage facile d'une utilisation au lit et au fauteuil grâce à sa station d'accueil (pas de fil à reconnecter)
- Telo fonctionne sur batterie
- Rapport qualité/nombres de fonctions/coût unique
- Possibilité de paramétrer, gérer les sauvegardes et les mises à jour depuis le logiciel TELO PC

Références

Référence	Désignation	
7T600	Telo avec Infra rouge, wifi, Bluetooth, GSM intégré, et support « intelligent » avec connectique	
7T601	Telo version Z wave (en plus des propriétés de Telo 7T600)	
7T620	Option reconnaissance vocale (valable pour les 2 versions)	
7T602	Support « intelligent », inclus dans 7T600 et 7T601. Station d'accueil Telo	
7T603	Bras orientable pour Telo	
7T605	Récepteur PC Telo	
7T606	Balise localisation telo	
7T607	Ensemble de 2 guides doigts Telo (9 et 20 cases) inclus avec Telo	
7T608	Protection Telo	
7T611	Câble TELO – Dynamic Control (Bus CAN)	
7T612	Câble TELO pour sorties relais (2 sorties)	
7T613	Câble TELO – Joystick contacts secs joystick pour 7T09	
7T614	Câble TELO – Penny and Giles	
7T615	Câble TELO – Dynamic Control & Sorties relais (2 sorties)	
7BJ60	Clé USB radio BJ	
7RA01	Convertisseur IR-RF Easy	
7RA02	Convertisseur IR-RF USB	

Accompagnement

Par la société Proteor ou son réseau de prestataires qualifiés :

- *Expert depuis plus de 32 ans*
- Formation spécifique Telo possible
- Installation/mise en service possible
- Présentation sur place
- Devis gratuit
- Maintenance spécifique
- Appareil de prêt en cas de besoin

Contacts et renseignements

Proteor aides électroniques

- Par email : aides.electroniques@proteor.com
- Par téléphone : 03.80.78.42.20
- Site internet : aides.electroniques.proteor.fr

Assistance technique / support client

- Par téléphone : 03.80.78.42.49
- Par email : support@proteor.com

MAJ 24/11/2016